

VIKTIG INFORMASJON!

Studér SalivaPOD nøye og les hele bruksanvisningen før du starter. Spytt-samling gjøres helst på morgenen. Du må ikke ha spist, pusset tennene eller ha brukt tobakk de siste 30 minutter før prøvetaking.

SalivaCODE App anbefales som bruksanvisning.

1A-I Dersom du bruker SalivaCODE App til registrering av spyttprøven med QR-kode: Følg alle stegene i appen første gang du utfører spytt-samlingen.

1A-II Dersom du skal bruke papiretiketten på pakningsvedlegget: Fyll inn navn og personnummer med penn og VENT TIL ETTER PRØVETAKINGEN med å klistre papiretiketten på SalivaPOD eller laboratorierøret.

1B Trekk av den grå toppen og sett den ned, ikke kast!

Du er nå klar for spytt-samlingen. LES HELE 1C FØR DU PRESSER SPYTT LANGSOMT INN I MUNNSTYKKET!




1C Hold SalivaPOD på høykant. Samle spytt foran i munnen og press spytt langsomt inn i det hvite munnstykket.

Gjenta flere ganger inntil FLYTENDE SPYTT NÅR OPP TIL LINJEN (1D). Følg med på flytende spytt i det indre røret mellom hver påfylling. Godt lys hjelper for synlighet.

Unngå luft og bobler, ikke blås! Sug lett tilbake ved skum på toppen av den indre sylindren (1E), eller sett fra deg prøven en liten stund før du gjentar.

1F VIKTIG! Hvis det har kommet mye spytt i det ytterste kammeret, bør dette fjernes for å unngå søl. Plasser toppen tilbake over munnstykket med pilen mot merket. Trykk toppen hardt ned til den stopper (1G).

Fullfør registreringen i appen eller fest til slutt den merkede papiretiketten på SalivaPOD (eller laboratorierøret, se side 2). Lever fra deg prøven ELLER gå til side 2 dersom du har fått utlevert laboratorierør, desinfeksjonsserviett og/eller pose.

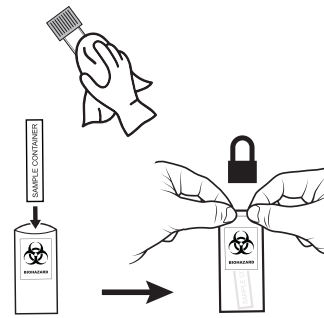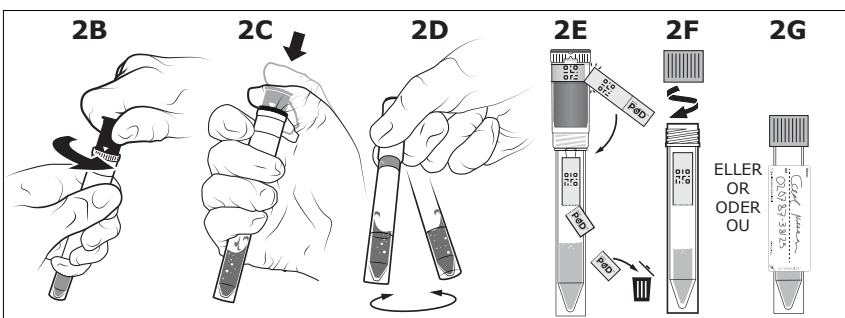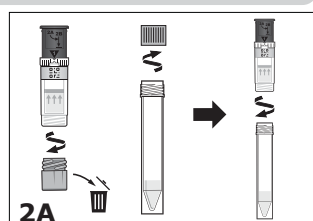

Med både SalivaPOD™ og et kompatibelt laboratorierør, gjør du følgende:

2A Skru av begge korkene. Behold korken til laboratorierøret. Den skal gjenbrukes. Sett sammen laboratorierøret mot undersiden av SalivaPOD™. Skru SalivaPOD™ på laboratorierøret.

2B Vri toppen ca 1cm. mot klokken.

2C Trykk toppen helt ned i bunnen av beholderen.

2D Rotér laboratorierøret for å blande innholdet.

2E Ved bruk av QR-kode: Riv av den ene QR-merkelappen, og flytt denne over på laboratorierøret. Avslutt med å rive av logo-delen. Ved skadet QR-kode, bruk reservekoden.

2F Skru SalivaPOD™ fra laboratorierøret og skru den røde korken hardt på laboratorierøret.

2G Hvis du skal benytte papiretiketten, skal den festes på langs av laboratorierøret ETTER desinfeksjonen (2H).

2H Hvis du har fått desinfeksjonsserviett og/eller pose: Rengjør laboratorierøret med desinfeksjonsserviett FØR DU SETTER PÅ HÅNSKREVEN PAPIRETIKETT (1A-II), legger laboratorierøret og absorbent inn i posen og lukker posen.