








VIKTIG INFORMATION!

Studera SalivaPOD noga och läs hela bruksanvisningen innan du börjar. Salivprov ska helst tas på morgonen. Du ska inte ha ätit, borstat tänderna eller använt tobak de senaste 30 minuterna innan provtagning.

SalivaCODE-appen rekommenderas som bruksanvisning.

1A-I Om du använder SalivaCODE-appen till registrering av salivproven med QR-kod: Följ alla stegen i appen första gången du utför salivprovet.

1A-II Om du ska använda pappersetiketten i bifogade anvisningar: Fyll in namn och personnummer med bläckpenna och VÄNTA TILLS EFTER PROVTAGNINGEN med att fästa pappersetiketten på SalivaPOD eller laborierör.

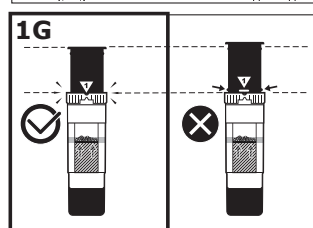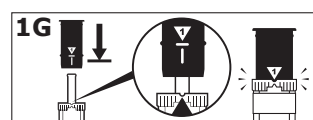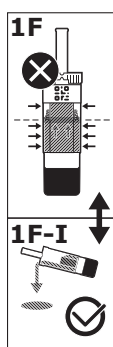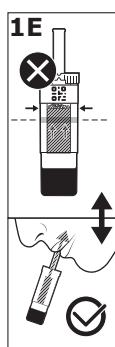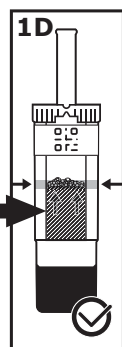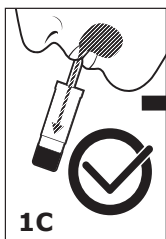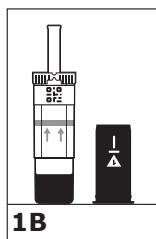

1B Dra av den grå toppen och lägg den åt sidan – kasta den inte!

Nu är du klar för salivprovet. **LÄSA HELA 1C INNAN DU PRESSAR SALIV LÅNGSAMT IN I MUNSTYCKET!**




1C Håll SalivaPOD på högkant. Samla saliv längst fram i munnen och pressa långsamt in saliv i det vita munstycket.

Upprepa flera gånger tills SALIV NÅR UPP TILL LINJEN (1D). Håll ett öga på saliven i det inre röret mellan varje påfyllning. Bra ljus främjar synlighet.

Undvik luft och bubblor, blås inte! Sug lätt tillbaka vid skum på toppen av den inre cylindern (1E), eller sätt ifrån dig provet en liten stund innan du fortsätter.

1F VIKTIGT! Om det har kommit mycket saliv i den yttersta kammaren ska detta tas bort för att undvika söl. Sätt tillbaka toppen över munstycket med pilen mot markeringen. Tryck ner toppen hårt tills den stoppar (1G).

Slutför registreringen i appen eller fäst den handskrivna pappersetiketten på SalivaPOD (eller laborierör, se sidan 2). Lämna ifrån dig provet **ELLER** gå till sidan 2 om du har fått laborierör, desinfektionsservett och/eller påse.

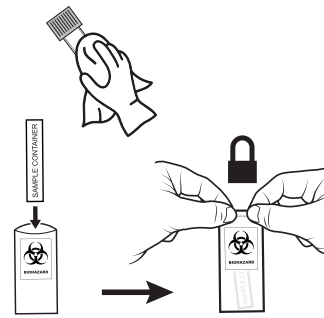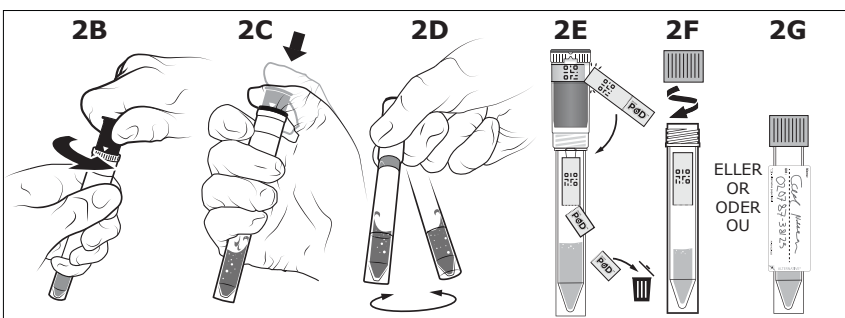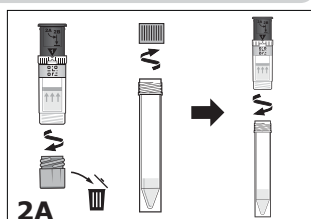

Gör följande med både SalivaPOD™ och ett kompatibelt laborierör:

2A Skruva av båda korkarna. Behåll korken till laborierör. Den ska användas igen. Håll laborierör mot undersidan av SalivaPOD™.

Skruva fast SalivaPOD™ på laborierör.

2B Vrid toppen ca 1 cm motsols.

2C Tryck toppen ända ner i botten av behållaren.

2D Roter laborierör för att blanda innehållet.

2E Vid användning av QR-kod: Riv av den ena QR-etiketten och flytta över denna till laborierör. Avsluta med att riva av logotypdelen. Använd reservkoden om QR-koden är skadad.

2F Skruva loss SalivaPOD™ från laborierör och skruva fast den röda korken ordentligt på laborierör.

2G Om du ska använda pappersetiketten fäster du den på längden på laborierör EFTER desinfektionen (2H).

2H Om du har fått desinfektionsservett och/eller påse: Rengör laborierör med desinfektionsservett INNAN DU SÄTTER PÅ DEN HANDSKRIVNA PAPPERSETIKETTEN (1A-II), lägger laborierör i påsen och stänger påsen.