








VIGTIG INFORMATION!

Sæt dig grundigt ind i SalivaPOD, og læs hele brugsanvisningen før du starter. **Spytindsamling skal helst gøre om morgenen. Du må ikke have spist, børstet tænder eller have brugt tobak de sidste 30 minutter før prøvetagningen.**

SalivaCODE App anbefales som brugsanvisning.

1A-I Hvis du bruger SalivaCODE App til registrering af spytpøven med QR-kode: Følg alle trinene i appen første gang du indsamler spyt.

1A-II Hvis du skal bruge papiretiketten på vedlægget i pakken: Udfyld navn og personnummer med pen, og VENT TIL EFTER PRØVETAGNINGEN med at klistre papiretiketten på SalivaPOD eller laboratorierør.

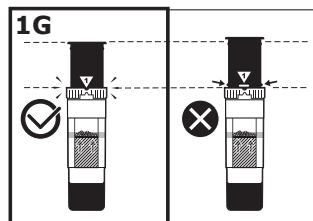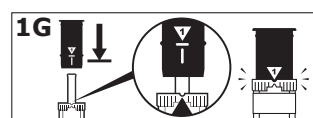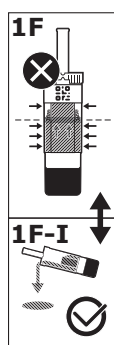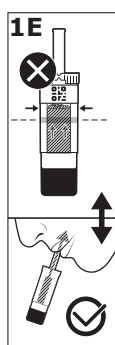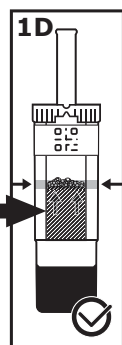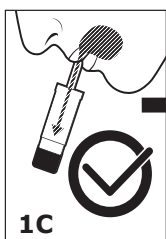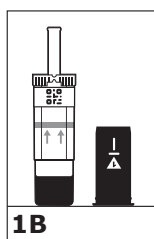

1B Træk den grå top af, og sæt den ned, og smid den ikke væk!



Du er nu klar til spytindsamlingen. **LÆS HELE 1C FØR DU LANGSOMT PRESSER SPYT IND I MUNDSTYKKET!**

1C Hold SalivaPOD på højkant. Saml spyt foran i munden og pres langsomt spyt ind i det hvide mundstykke.

Gentag flere gange, indtil FLYDENDE SPYT NÅR OP TIL LINJEN (1D). Følg med på det flydende spyt i det indre rør mellem hver påfyldning. Godt lys gør det lettere at se.

Undgå luft og bobler, blæs ikke! Sug let tilbage, når der er skum på øverst i den indre cylinder (1E), eller lad prøven hvile et kort stykke tid, før du gentager. **1F VIGTIGT!** Hvis der er kommet meget spyt i det yderste kammer, bør dette fjernes for at undgå spild. Sæt toppen tilbage over mundstykket med pilen mod mærket. Tryk toppen hårdt ned, til den stopper (1G).

Fuldfør registreringen i appen, eller sæt til sidst den håndskrevne papiretiket på SalivaPOD (eller laboratorierør, se side 2). Indlever prøven **ELLER** gå til side 2, hvis du har fået udleveret laboratorierør, desinfektionsserviet og/eller pose.

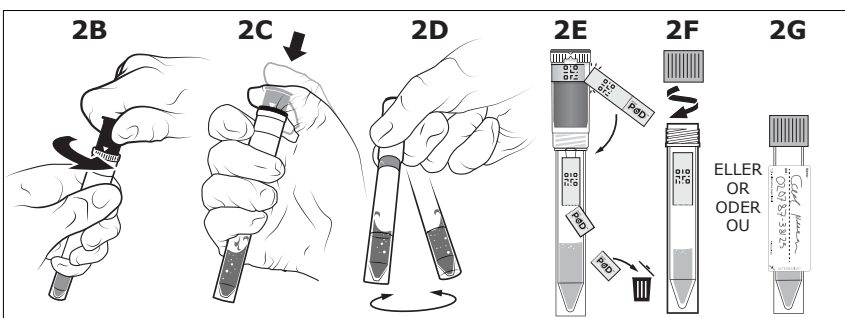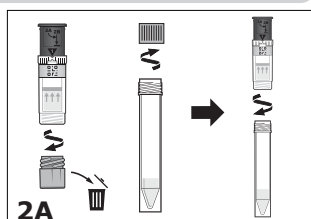

Med både SalivaPOD™ og et kompatibelt laboratorierør gør du følgende:

2A Skru begge hætterne af. Behold hætten fra laboratorierøret. Den skal genbruges. Sæt laboratorierøret sammen mod undersiden af SalivaPOD™.

Skru SalivaPOD™ på laboratorierøret. **2B** Drej toppen ca. 1cm. mod uret.

2C Tryk toppen helt ned i bunden af beholderen.

2D Drej på laboratorierøret for at blande indholdet.

2E Ved brug af QR-kode: Riv den ene QR-mærkeseddel af, og flyt den over på laboratorierøret. Slut af med at afrive logo-delen. Hvis QR-kode er skadet, brug reservekoden.

2F Skru SalivaPOD™ fra laboratorierøret, og skru den røde hætte hårdt på laboratorierøret.

2G Hvis du skal bruge papiretiketten, skal den sættes på langs af laboratorierøret EFTER desinfektionen (2H).

2H Hvis du har fået desinfektionsserviet og/eller pose: Rengør laboratorierøret med desinfektionsservietten FØR DU SÆTTER DEN HÅNSKREVNE PAPIRETIKET PÅ (1A-II), læg laboratorierøret i posen og luk posen.