


TÄRKEÄÄ TIETOA!
Tutustu SalivaPODiin huolellisesti ja lue kaikki käyttöohjeet ennen käyttöä. Syljen keräys on parasta suorittaa aamulla. Sinun tulee olla syömättä, harjaamatta hampaitasi tai käyttämättä tupakkatuotteita 30 minuutin ajan ennen näytteen ottoa.

SalivaCODE-sovellusta suositellaan käyttöoppaaksi.

1A-I Jos käytät SalivaCODE-sovellusta, rekisteröi sylkinäyte QR-koodilla: Noudata sovelluksen ohjeita, kun otat sylkinäytettä ensimmäistä kertaa.

1A-II Jos käytät pakkausselosteen paperietikettiä: Kirjoita nimesi ja kansallinen tunnistenumerosi muste- tai kuulakärkikynällä, ODOTA KUNNES NÄYTE ON OTETTU, ja vie sitten paperietiketti SalivaPODiin tai

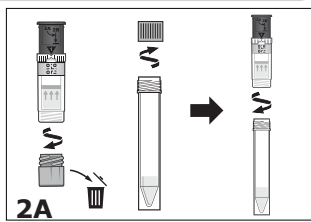


Suorita seuraavat vaiheet sekä SalivaPODin™ että yhteensopivan koeputken kanssa:

2A Avaa molemmat korkit. Säilytä koeputken korkki. Sitä käytetään uudelleen. Kokoa koeputki SalivaPODin™ pohjalla.

Kierrä SalivaPOD™ koeputkeen.

2B Kierrä korkkia noin 1 cm vastapäivään.

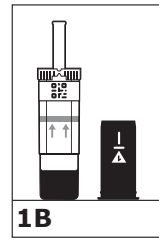



koeputkeen.

1B Irrota harmaa korkki ja aseta se sivuun, mutta älä hävitä sitä!

Olet nyt valmis ottamaan sylkinäytteen. **LUE KOKO KOHTA 1C ENNEN KUIN PAINAT SYLKEÄ HITAASTI SUUKAPPALEESEEN!** **1C** Pidä SalivaPODia pystyasennossa. Kerää sylkeä suun etuosasta ja paina sylkeä hitaasti valkoiseen suukappaleeseen.

Toista useasti, kunnes NESTE SAAVUTTAA RAJAMERKIN (1D). Seuraa nestemäisen syljen tasoa sisemmässä putkessa jokaisen täytön välissä. Hyvä valaistus auttaa näkemään tason paremmin.


Vältä ilmaa ja kuplien muodostumista, älä puhalla! Ime sisemmän sylinterin

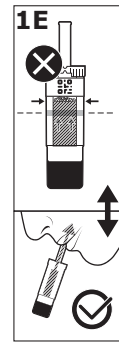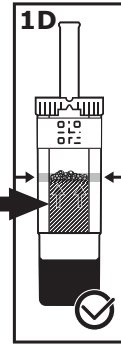

(1E) yläosassa oleva vaahto hitaasti takaisin tai aseta koe syrjään hetkeksi ennen uutta täyttökertaa.

1F TÄRKEÄÄ! Jos ulompaan kammioon on joutunut liikaa sylkeä, se tulisi poistaa, jotta vältetään ylivuodolta. Aseta korkki takaisin suukappaleen päälle siten, että nuoli osoittaa merkkiä kohti. Paina korkkia lujasti kunnes se on pohjassa (1G).

Suorita rekisteröinti loppuun sovelluksessa tai kiinnitä lopuksi käsin kirjoitettu paperietiketti SalivaPODiin (tai koeputkeen sen jälkeen, kun olet suorittanut sivun 2 vaiheet). Lähetä näyte TAI mene sivulle 2 jos olet saanut koeputken, desinfiointipyyhkeen ja/tai laukun.

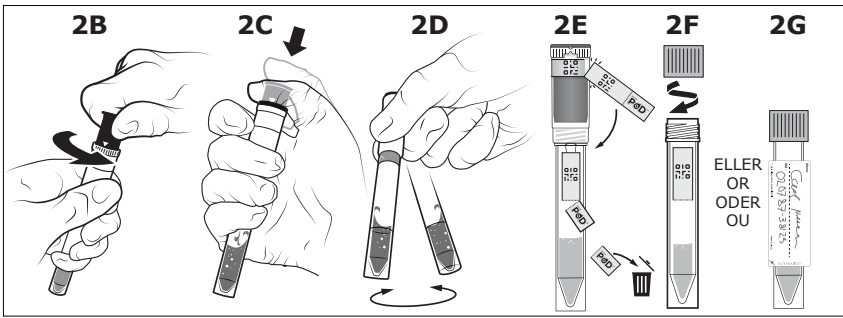

2C Paina korkki kokonaan alas säiliön pohjaan saakka.

2D Kierrä koeputkea, jolloin sisältö sekoittuu.

2E Kun käytät QR-koodia: Revi irti yksi QR-etiketti ja vie se koeputkelle. Viimeistele repimällä irti kohta, jossa on logo. Jos QR-koodi on vaurioitunut, käytä varakoodia.

2F Kierrä SalivaPOD™ irti koeputkesta ja kierrä punainen korkki tiukasti koeputkeen.

2G Jos käytät paperietikettiä, tämä täytyy asettaa pitkittäissuunnassa koeputkeen desinfioinnin JÄLKEEN (2H).

2H Jos olet saanut desinfiointipyyhkeen ja/ tai laukun: Puhdista koeputki desinfiointipyyhkeellä ENNEN KUIN ASETAT KÄSIN KIRJOITETUN PAPERIETIKETIN (1A-II), laita merkattu näyteputki laukkuun ja sinetöi laukku.

