



INFORMACIÓN IMPORTANTE
Estudie SalivaPOD cuidadosamente y lea todas las instrucciones de uso antes de empezar. La muestra de saliva se toma idealmente por la mañana. No debe comer, lavarse los dientes, o usar productos que contengan tabaco en los 30 minutos anteriores a la toma de la muestra de saliva.

Como guía de uso se recomienda la aplicación SalivaCODE.

1A-I Si utiliza la aplicación SalivaCODE para registrar la muestra de saliva con un código QR: Siga todos los pasos detallados en la aplicación la primera vez que tome una muestra de saliva.

1A-II Si utiliza la etiqueta de papel del folleto del paquete: Rellene su nombre y su número nacional de identidad con un bolígrafo, Y CUANDO YA HAYA TOMADO LA MUESTRA, entonces pegue

la etiqueta de papel al SalivaPOD o tubo de ensayo.




1B Quite el tapón gris y guárdelo. Sobre todo, no lo tire. Ahora está a punto para la toma de la muestra de saliva. LEA TODA LA SECCIÓN 1C ANTES DE INTRODUCIR SALIVA DESPACIO POR LA BOQUILLA.

1C Sostenga el SalivaPOD en posición vertical. Deje que la saliva se acumule en la parte delantera de la boca y vaya introduciendo saliva despacio en la boquilla blanca.

Repita varias veces hasta que la SALIVA LÍQUIDA LLEGUE A LA LÍNEA (1D). Compruebe la cantidad de saliva líquida del tubo interior cada vez que realice este proceso. Se requiere una buena iluminación que garantice la visibilidad.

Evite el aire y las burbujas, no sople. Extraiga la espuma de la parte superior del cilindro interior (1E) succionando suavemente, o deje reposar el equipo un momento antes de repetir el proceso.

1F IMPORTANTE Si ha entrado demasiada saliva en la cámara exterior, esta debería retirarse para evitar derrames. Coloque el tapón en la boquilla con la flecha alineada con la marca. Presione fuertemente el tapón hasta que cierre completamente (1G). Complete el registro en la aplicación o finalmente pegue la etiqueta de papel rellena a mano al SalivaPOD (o el tubo de ensayo, DESPUÉS DE completar los pasos descritos en la página 2). Entregue la muestra O vaya a la página 2 si ha recibido un tubo de ensayo, una toallita desinfectante y/o una bolsa.

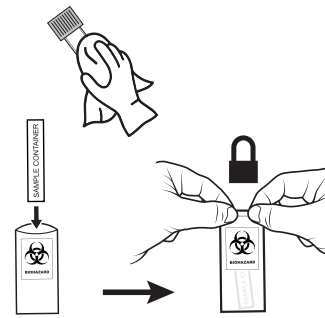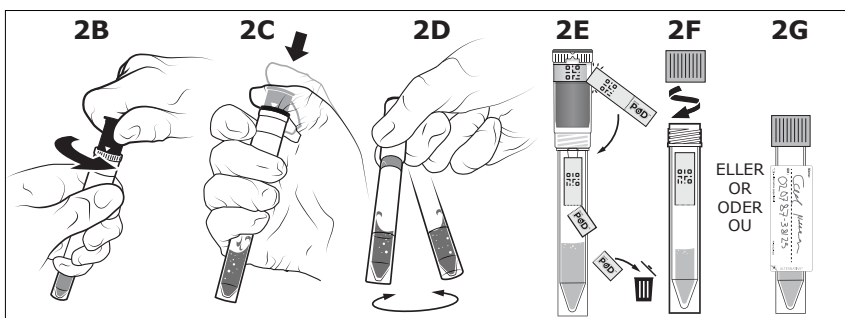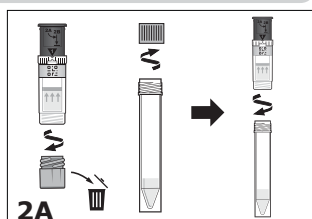

Con el SalivaPOD™ y un tubo de ensayo compatible, realice los siguientes pasos:

2A Desenrosque ambos tapones. Guarde el tapón para el tubo de ensayo. Va a necesitarlo luego. Coloque el tubo de ensayo en la parte inferior del SalivaPOD™.

Enrosque el SalivaPOD™ en el interior del tubo de ensayo.

2B Gire el tapón 1cm aproximadamente en dirección

contraria a las agujas del reloj.

2C Presione el tapón hasta el fondo del envase.

2D Haga girar el tubo de ensayo para mezclar los contenidos.

2E Cuando use el código QR: Arranque una de las etiquetas QR y póngala encima del tubo de ensayo. Termine arrancando la sección del logotipo. Si el código QR resulta dañado, use el otro código.

2F Desenrosque el SalivaPOD™ del

tubo de ensayo y enrosque el tapón rojo firmemente en el tubo de ensayo.

2G Si utiliza la etiqueta de papel, esta debe pegarse longitudinalmente al tubo de ensayo DESPUÉS de desinfectarlo (2H).

2H Si ha recibido una toallita desinfectante y/o una bolsa: Limpie el tubo de ensayo con la toallita desinfectante ANTES DE PEGAR LA ETIQUETA DE PAPEL RELLENA A MANO (1A-II), ponga el tubo de muestra etiquetado en la bolsa y ciérrela.