

WICHTIGE INFORMATIONEN!

Befassen Sie sich sorgfältig mit dem SalivaPOD und lesen Sie alle Gebrauchsanweisungen, bevor Sie beginnen. Eine Speichelprobenahme erfolgt idealerweise morgens. Sie dürfen 30 Minuten vor der Probenahme nichts gegessen, Ihre Zähne geputzt oder Tabakprodukte verwendet haben.

Die SalivaCODE-App wird als Leitfaden für die Verwendung empfohlen.

1A-I Wenn Sie die SalivaCODE-App verwenden, um die Speichelprobe mit einem QR-Code zu registrieren: Befolgen Sie alle Schritte in der App, wenn Sie zum ersten Mal eine Speichelprobe nehmen.

1A-II Wenn Sie das Papieretikett in der Packungsbeilage verwenden: Beschriften Sie das Etikett mit Ihren Namen und Ihrer Personalausweisnummer, WARTEN SIE, BIS DIE PROBE ENTNOMMEN WURDE, und kleben Sie dann das Papieretikett auf SalivaPOD oder das Teströhrchen.

1B Entfernen Sie die graue Kappe und legen Sie sie beiseite. Entsorgen Sie sie nicht!

Sie sind jetzt bereit für die Speichelprobenahme. **LESEN SIE DEN GESAMTEN PUNKT 1C DURCH, BEVOR SIE LANGSAM SPEICHEL IN DAS MUNDSTÜCK DRÜCKEN!**

1C Halten Sie den SalivaPOD aufrecht. Sammeln Sie etwas Speichel vor Ihrem Mund und drücken Sie den Speichel langsam in das weiße Mundstück.




Wiederholen Sie diesen Punkt mehrmals, bis FLÜSSIGER SPEICHEL DIE LINIE ERREICHT (1D). Behalten Sie den flüssigen Speichel im Innenröhrchen zwischen jedem Füllvorgang im Auge. Gute Beleuchtung ist hilfreich dafür, für angemessene Sichtverhältnisse zu sorgen.

Vermeiden Sie Luft und Luftblasen – pusten Sie nicht in das Mundstück!

Saugen Sie Schaum oben am Innenröhrchen (1E) leicht zurück oder stellen Sie den Test kurz zur Seite, bevor Sie fortfahren.

1F WICHTIG! Wenn zu viel Speichel in die äußere Kammer gelangt ist, sollte dieser entfernt werden, um ein Verschütten zu vermeiden. Setzen Sie die Kappe wieder über das Mundstück. Der Pfeil muss zur Markierung zeigen. Drücken Sie die Kappe fest nach unten, bis sie sich nicht weiter festdrücken lässt (1G).

Schließen Sie die Registrierung in der App ab oder kleben Sie das handbeschriftete Papieretikett auf den SalivaPOD (oder das Teströhrchen, NACHDEM Sie die Schritte auf Seite 2 abgeschlossen haben). Reichen Sie die Probe ein ODER gehen Sie zu Seite 2, wenn Sie ein Teströhrchen, ein Desinfektionstuch und/oder einen Beutel erhalten haben.

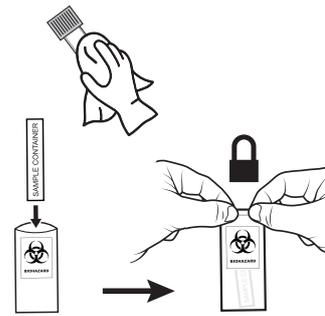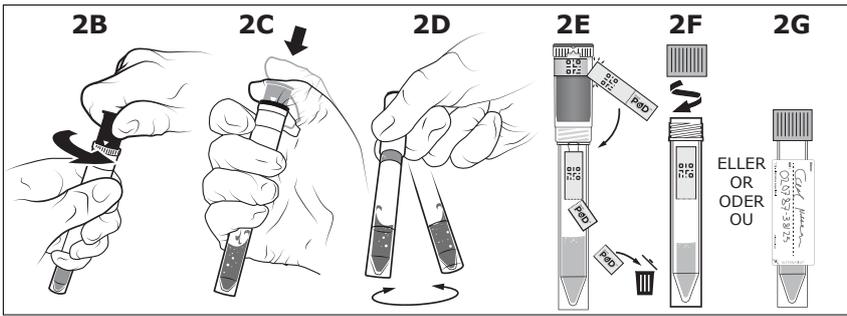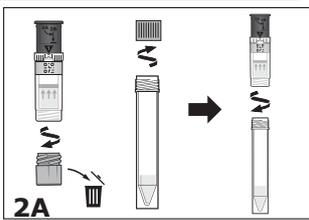

Führen Sie mit dem SalivaPOD™ und einem kompatiblen Teströhrchen Folgendes aus:

2A Schrauben Sie beide Kappen ab. Bewahren Sie die Kappe für das Teströhrchen auf. Es wird wiederverwendet. Bringen Sie das Teströhrchen unten am SalivaPOD™ an. Schrauben Sie den SalivaPOD™ in das Teströhrchen.

2B Drehen Sie die Kappe ca. 1 cm gegen den Uhrzeigersinn.

2C Drücken Sie die Kappe bis zum Boden des Behälters.

2D Drehen Sie das Teströhrchen, um den Inhalt zu mischen.

2E Bei Verwendung des QR-Codes: Trennen Sie eines der QR-Etiketten ab und legen Sie es zum Teströhrchen. Trennen Sie zum Schluss den Bereich mit dem Logo ab. Wenn der QR-Code beschädigt ist, verwenden Sie den Ersatzcode.

2F Schrauben Sie den SalivaPOD™ vom Teströhrchen ab und schrauben Sie die rote Kappe fest auf das Teströhrchen.

2G Wenn Sie das Papieretikett verwenden, muss dieses NACH der Desinfektion in Längsrichtung auf das Teströhrchen geklebt werden (2H).

2H Wenn Sie ein Desinfektionstuch und/oder einen Beutel erhalten haben: Reinigen Sie das Teströhrchen mit dem Desinfektionstuch, BEVOR SIE DAS HANDBESCHRIFTETE PAPIERETIKETT AUFKLEBEN (1A-II), legen Sie die gekennzeichnete Probe in den Beutel und verschließen Sie ihn.