

INFORMAZIONI IMPORTANTI!

Studiare con attenzione SalivaPOD e leggere tutte le istruzioni per l'uso prima di iniziare. La raccolta della saliva è idealmente fatta al mattino. Non bisogna mangiare, lavare i denti o usare prodotti del tabacco nei 30 minuti precedenti il campionamento.

L'app SalivaCODE è raccomandata come guida all'uso.

1A-I Se si usa l'app SalivaCODE per registrare il campione di saliva con un codice QR: Seguire tutti i passi dell'applicazione la prima volta che si raccoglie il campione di saliva.

1A-II Se si usa l'etichetta di carta del foglietto illustrativo: Inserire il nome e il numero identificativo nazionale con una penna, ATTENDERE FINCHÉ IL CAMPIONE NON VIENE PRELEVATO, poi attaccare l'etichetta di carta al SalivaPOD o alla provetta.

1B Rimuovere il tappo grigio e metterlo da parte, non scartarlo!

Ora si è pronti per la raccolta della saliva. **LEGGERE TUTTO L'1C PRIMA DI PREMERE LENTAMENTE LA SALIVA NEL BOCCAGLIO!**

1C Tenere il SalivaPOD in posizione verticale. Raccogliere la saliva nella parte anteriore della bocca e premere lentamente la saliva nel boccaglio bianco.




Ripetere più volte fino a quando la SALIVA LIQUIDA NON ARRIVA FINO ALLA LINEA (1D). Tenere traccia della saliva liquida nella camera d'aria tra ogni riempimento. Una buona illuminazione aiuta la visibilità.

Evitare aria e bolle, non soffiare! Aspirare leggermente la schiuma nella parte superiore del cilindro interno, o mettere il test da parte

per un breve periodo prima di ripetere.

1F IMPORTANTE! Se troppa saliva entra nella camera esterna, è necessario rimuoverla per evitare fuoriuscite. Riposizionare il tappo sul boccaglio con la freccia rivolta verso il segno. Premere con forza il tappo verso il basso finché non si ferma (1G).

Completare la registrazione nell'app o infine applicare l'etichetta di carta scritta a mano al SalivaPOD (o la provetta, DOPO aver completato i passaggi a pag. 2). Inviare il campione OPPURE andare a pagina 2 se è stata ricevuta una provetta, una salvietta disinfettante e/o un sacchetto.

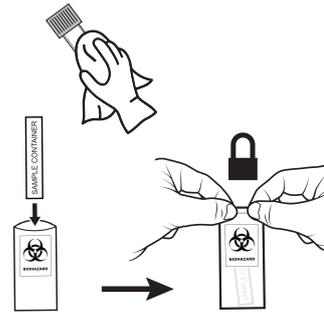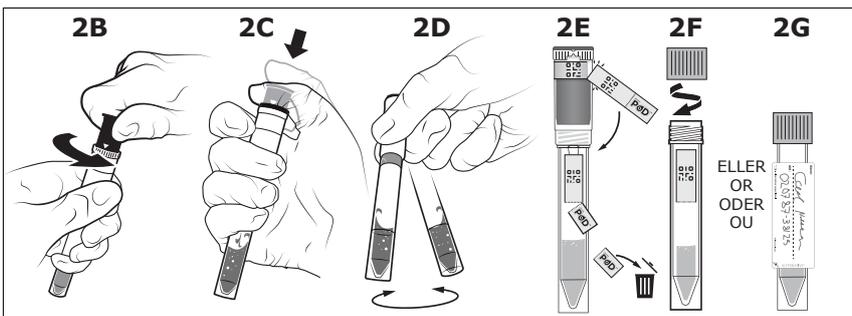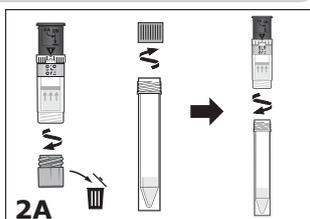

Con il SalivaPOD™ e una provetta compatibile, eseguire quanto segue:

2A Svitare entrambi i tappi. Conservare il tappo della provetta. Sarà riutilizzato. Montare la provetta sul fondo del SalivaPOD™.

Avvitare SalivaPOD™ nella provetta.

2B Ruotare il tappo di circa 1 cm in senso antiorario.

2C Premere il tappo fino in fondo al contenitore.

2D Ruotare la provetta per mescolare il contenuto.

2E Quando si usa il codice QR: Strappare una delle etichette QR e spostarla nella provetta. Finire strappando la sezione del logo. Se il codice QR è danneggiato, usare il codice di riserva.

2F Svitare SalivaPOD™ dalla provetta e avvitarlo saldamente il tappo rosso

sulla provetta.

2G Se si utilizza l'etichetta di carta, questa deve essere incollata longitudinalmente sulla provetta DOPO la disinfezione (2H).

2H Se si dispone di una salvietta disinfettante e/o un sacchetto: Pulire la provetta con la salvietta disinfettante PRIMA DI APPORRE L'ETICHETTA DI CARTA SCRITTA A MANO (1A-II), mettere la provetta campione marcata nella busta e sigillare la busta.