








DŮLEŽITÁ INFORMACE!

Před zahájením si pečlivě prostudujte SalivaPOD a přečtěte si všechny pokyny k použití. Odběr slin je nejlépe provádět ráno. 30 minut před odběrem vzorku nesmíte jíst, čistit si zuby nebo užívat tabákové produkty.

Jako průvodce použitím se doporučuje aplikace SalivaCODE.

1A-I Pokud používáte aplikaci SalivaCODE k registraci vzorku slin pomocí QR kódu: Při prvním odběru vzorku slin postupujte podle všech kroků v aplikaci.

1A-II Pokud používáte papírový štítek v příbalové informaci: Vyplňte perem své jméno a národní identifikační číslo, POČKEJTE, NEŽ BUDE VZOREK ODEBRÁN, a pak nalepte papírový štítek na SalivaPOD nebo na zkumavku.

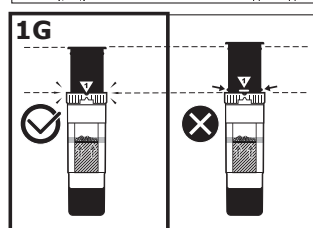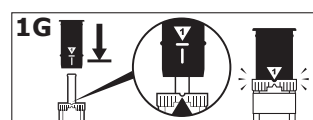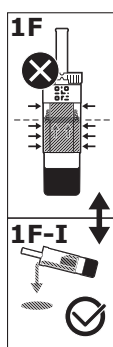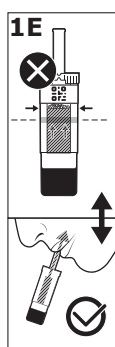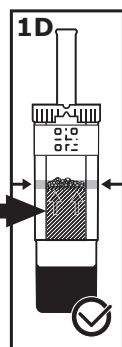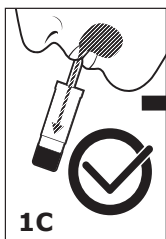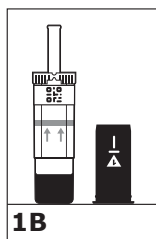

1B Sejměte šedé víčko a odložte jej stranou, nevyhazujte ho!

Nyní jste připraveni k odběru slin. **PŘEČTĚTE SI VŠECHNO Z 1C PŘED POMALÝM VTLAČENÍM SLIN DO NÁUSTKU!**

1C Držte SalivaPOD ve svislé poloze. Odeberte sliny v přední části vašich úst a pomalu je vtláčujte do bílého náustku.



Opakujte několikrát, dokud se **KAPALINA SLIN NEDOSTANOU AŽ K ČÁRCE (1D)**. Sledujte kapalinu slin ve vnitřní trubici mezi každou náplní. Dobré osvětlení pomáhá viditelnosti.

Vyhňte se vzduchu a bublinám, nefoukejte! Lehce nasajte pěnu zpět v horní části vnitřního válce

nebo před opakováním test na krátkou dobu odložte stranou (1E).

1F DŮLEŽITÉ! Pokud se do vnější komory dostalo příliš mnoho slin, je třeba je odstranit, aby nedošlo k rozlití. Nasaďte víčko zpět na náustek tak, aby šipka směřovala ke značce. Zatláče víčko dolů, dokud se nezastaví (1G).

Dokončete registraci v aplikaci nebo nalepte ručně psaný papírový štítek na SalivaPOD (nebo zkumavku PO dokončení kroků na straně 2). Odešlete vzorek **NEBO** přejděte na stranu 2, pokud jste obdrželi zkumavku, dezinfekční ubrousek a/nebo sáček.

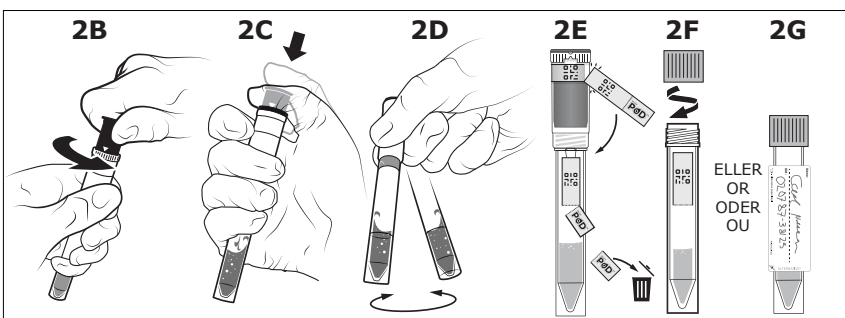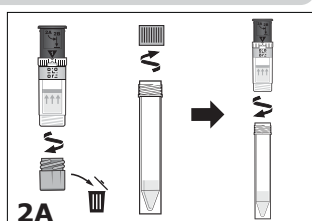

Jak u SalivaPOD™ tak u kompatibilní zkumavky proved'te následující:

2A Odšroubujte obě víčka. Uchovejte uzávěr pro zkumavku. Bude znovu použit. Namontujte zkumavku na spodní část SalivaPOD™.

Zašroubujte SalivaPOD™ do zkumavky.

2B Otočte víčko přibližně 1 cm proti směru hodinových ručiček.

2C Zatláče víčko až na dno nádoby.

2D Otáčením zkumavky promíchejte obsah.

2E Při použití QR kódu: Odtrhněte jeden ze štítků QR a přesuňte jej do zkumavky. Na závěr odtrhněte část s logem. Pokud je QR kód poškozený, použijte náhradní kód.

2F Odšroubujte SalivaPOD™ ze zkumavky a pevně našroubujte červený uzávěr na zkumavku.

2G Pokud používáte papírový štítek, musí být po dezinfekci (2H) nalepen podélně na zkumavku.

2H Pokud jste dostali dezinfekční ubrousek a/nebo sáček: Vyčistěte zkumavku dezinfekčním ubrouskem PŘED NALEPENÍM RUČNĚ PSANÉHO ŠTÍTKU PAPIRU (1A-II), dejte označenou zkumavku se vzorkem do sáčku a sáček uzavřete.

