

WAŻNE INFORMACJE!

Przed rozpoczęciem zapoznaj się dokładnie z urządzeniem SalivaPOD i przeczytaj wszystkie instrukcje użytkowania. Ślinę najlepiej jest zbierać rano. Na 30 minut przed pobraniem próbki nie należy jeść, myć zębów ani zażywać wyrobów tytoniowych.

W charakterze przewodnika stosowania urządzenia zaleca się aplikację SalivaCODE.

1A-I Jeśli korzystasz z aplikacji SalivaCODE do rejestracji próbki śliny za pomocą kodu QR: Wykonaj wszystkie kroki wskazane w aplikacji przy pierwszym pobraniu próbki śliny.

1A-II Jeśli korzystasz z papierowej etykiety dołączonej do ulotki: Wpisz długopisem swoje imię i nazwisko oraz krajowy numer identyfikacyjny, **NAJPIERW POBIERZ PRÓBKĘ**, a następnie przyklej papierową etykietę

do urządzenia SalivaPOD lub do próbki.

1B Zdejmij szarą nakrętkę i odłóż ją na bok. Nie wyrzucaj!

Jesteś teraz gotowy do pobrania śliny. ZANIM POWOLI WTŁOCZYSZ ŚLINĘ DO USTNIKA, PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PODANE W PUNKCIE 1C!




1C Trzymaj urządzenie SalivaPOD pionowo. Zbierz ślinę w przedniej części ust i powoli wtłocz ją do białego ustnika. **Powtarzaj tę czynność kilka razy, aż POZIOM PŁYNNEJ ŚLINY SIĘGNIĘ ZAZNACZONEJ LINII (1D).** Między każdym wtłoczeniem sprawdzaj poziom płynnej śliny w wewnętrznej rurce. Dobre oświetlenie poprawi widoczność.

Unikaj wtłaczania powietrza i bąbelków. Nie dmuchaj! Lekko

odessij pianę z górnej części wewnętrznego pojemnika lub odstaw test na krótką chwilę przed powtórzeniem czynności (1E).

1F WAŻNE! Jeśli do komory zewnętrznej dostało się zbyt dużo śliny, należy ją usunąć, aby uniknąć rozlania. Umieścić nakrętkę z powrotem nad ustnikiem, tak aby strzałka była skierowana w stronę zaznaczenia. Dociśnij ją mocno, aż się zatrzyma (**1G**).

Dokończ rejestrację w aplikacji lub przyklej wypełnioną ręcznie etykietę papierową do SalivaPOD (lub do próbki, PO zakończeniu kroków przedstawionych na stronie 2). Prześlij próbkę LUB przejdź do strony 2, jeśli otrzymałeś próbkę, ściereczkę do dezynfekcji lub torebkę.

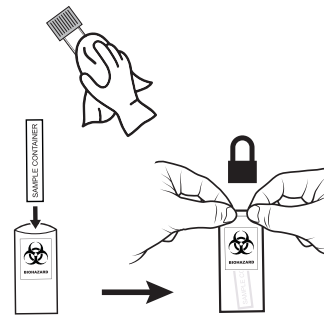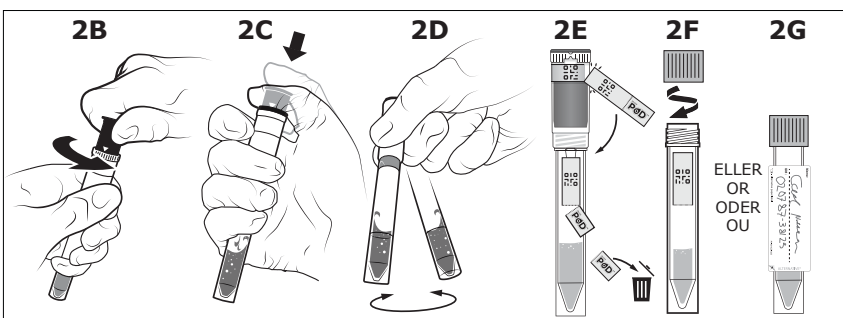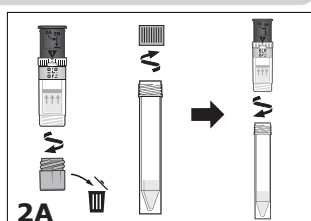

Jeśli masz zarówno SalivaPOD™, jak i kompatybilną z tym urządzeniem próbkę, wykonaj następujące czynności:

2A Odkręć obie nakrętki. Zachowaj nakrętkę od próbki. Będzie jeszcze później potrzebna. Zamontuj próbkę na dnie SalivaPOD™.

Wkręć SalivaPOD™ w próbkę.

2B Przekręć nakrętkę o ok. 1 cm w lewo

2C Wciśnij nakrętkę do samego dna pojemnika.

2D Obróć próbkę, aby wymieszać zawartość.

2E Jeśli korzystasz z kodu QR: Oderwij jedną z etykiet z kodem QR i przenieś ją na próbkę. Na koniec oderwij część z logo. Jeśli kod QR jest uszkodzony, użyj kodu zapasowego.

2F Wykręć SalivaPOD™ z próbki i szczelnie ją zamknij za pomocą czerwonej nakrętki.

2G Jeśli używasz papierowej etykiety, należy ją nakleić wzdłuż ZDEZYNFEKOWANEJ WCZEŚNIEJ próbki (**2H**).

2H Jeśli otrzymałeś chusteczkę dezynfekującą lub torebkę: Wyczyść próbkę chusteczką dezynfekującą PRZED NAKLEJENIEM WYPEŁNIONEJ RĘCZNIE PAPIEROWEJ ETYKIETY (**1A-II**), włóż oznaczoną próbkę do torby i zaklej torebkę.