

معلومات مهمة!

ادرس جهاز **SalivaPOD** بعناية، واقرأ تعليمات الاستخدام كلها قبل البدء. أفضل وقت لجمع عينة من اللعاب يكون في الصباح. ويجب ألا تكون قد أكلت، أو غسلت أسنانك بالفرشاة، أو استخدمت منتجات التبيغ قبل جمع العينة **بـ 30 دقيقة**.

يوصى باستخدام تطبيق **SalivaCODE** كدليل للاستخدام.

1 أولاً إذا كنت تستخدم تطبيق **SalivaCODE** لتسجيل عينة اللعاب برمز الاستجابة السريعة (OR): اتبع جميع الخطوات الواردة في التطبيق في المرة الأولى التي تجمع فيها عينة اللعاب.

1 ثانياً إذا كنت تستخدم الملصق الورقي الموجود في نشرة العبوة: اكتب

اسمك ورقم هويتك بقلم، وانتظر حتى يتم جمع العينة، ثم قم بلصق الملصق الورقي على جهاز **SalivaPOD** أو أنبوب الاختبار.

1 ب اززع الغطاء الرمادي وضعه جانباً، لكن لا تتخلص منه! أنت الآن جاهز لجمع عينة اللعاب. اقرأ كل التعليمات الواردة في بند **1 ج** قبل




وضع جهاز **SALIVA** برفق في الفم!

1 ج أمسك جهاز **SalivaPOD** بشكل مستقيم. اجمع اللعاب الموجود في مقدمة فمك، وادفع اللعاب ببطء نحو الفوهة البيضاء.

كرر عدة مرات حتى يصل اللعاب السائل إلى الخط (1d). تتابع اللعاب السائل في الأنابيب الداخلي بين كل تعبئة. وستساعد الإضاعة الجيدة على الروية. تجنب الهواء والفقاعات، ولا تنفخ! قم بامتصاص الرغوة برفق في الجزء

العلوي من الأسطوانة الداخلية، أو أوقف الاختبار لفترة قصيرة قبل التكرار. **1 د** مهم! إذا دخل الكثير من اللعاب إلى الحجيرة الخارجية، يجب إزالته لتجنب الاسكتاب. أعد وضع الغطاء فوق الفوهة، بحيث يكون السهم مواجهًا للعلامة. اضغط على الغطاء بقوة لأسفل حتى يتوقف (1z).

أكمل التسجيل في التطبيق أو ثبت الملصق الورقي المكتوب يدوياً والمعلم في جهاز **SalivaPOD** (أو أنبوب الاختبار)، بعد إكمال الخطوات المذكورة في صفحة رقم 2). أرسل العينة أو انتقل إلى صفحة رقم 2 إذا ثقلت أنبوب اختبار و/أو منديل و/أو كيس معقم.

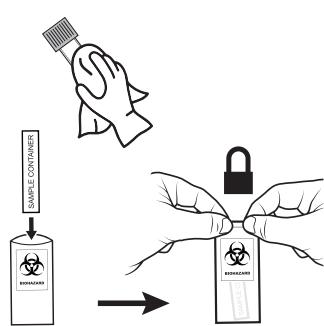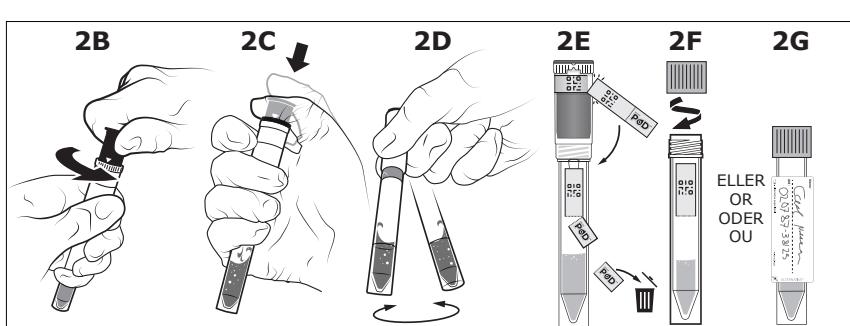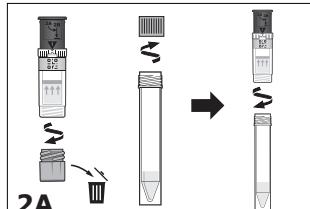

2 باستخدام جهاز **SalivaPOD** وأنبوب اختبار متوافق، قم بما يلي: **2** فك كلا الغطائين. احتفظ بغطاء أنبوب الاختبار. فسيتم إعادة استخدامه. ركب أنبوب الاختبار في الجزء السفلي من جهاز **SalivaPOD**™.

اربط جهاز **SalivaPOD** في أنبوب الاختبار.

2 ب قم بلف الغطاء 1 سم تقريباً عكس اتجاه عقارب الساعة.

2 ج اضغط على الغطاء حتى أسفل الحاوية.
2 د أدر أنبوب الاختبار لخلط المحتويات.

2 ه عند استخدام رمز الاستجابة السريعة (QR): قم بقص أحد ملصقات الاستجابة السريعة

(QR) ووضعه على أنبوب الاختبار. وأنه الأمر بقص الشعار. في حالة تلف رمز الاستجابة السريعة، استخدم الرمز الاحتياطي.

2 و قم بفك جهاز **SalivaPOD** من أنبوب الاختبار، واربط الغطاء الأحمر بإحكام على أنبوب الاختبار.

2 ز إذا كنت تستخدم الملصق الورقي، يجب لصقه بالطول على أنبوب الاختبار بعد التعقيم.

2 ح إذا كنت قد استلمت منديلاً و/أو كيساً معقماً: نظف أنبوب الاختبار بالمنديل المعقم، قبل وضع الملصق الورقي المكتوب يدوياً (1-ثانية)، ووضع أنبوبة العينة المعلمة في الكيس ثم أغلقه